


Anleitung RingJect

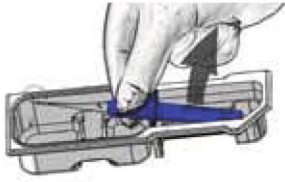

1. Entfernen Sie den RingJect aus der Blisterpackung.

2. Drücken Sie den Stift vorsichtig bis zum Klicken in den Injektor.



3. Ziehen Sie den Stift langsam aus dem Injektor. Der Kapselspannung ist nun „geladen“.




4. Der Injektor ist nun bereit für die Implantation in das Auge.


EyeNOVATION®

INNOVATION IM AUGE

Implantation **GEGEN** den Uhrzeigersinn

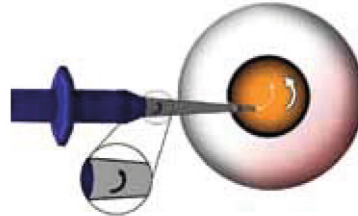

Implantation **IM** Uhrzeigersinn

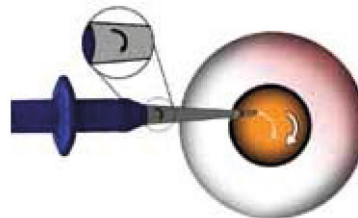

Verschiedene Instrumente für die Implantation im oder gegen den Uhrzeigersinn: Der Pfeil auf der Spitze des Injektors zeigt die Richtung an, in der der Kapselspannung aus dem Injektor austritt

